

Instalación, Calibración & Uso




Por favor, verifique que el ordenador cumpla los requisitos antes de instalar el Software

CPU	Configuración mínima del Portatil / PC
Sistema operativo	Windows 10 (64-bit) o Superior
CPU	Intel Core i5 de 11 generación o Superior
Tarjeta gráfica	NVIDIA RTX 3060 6GB o Superior
Disco duro	512GB o Superior
Memoria	16GB o Superior
Puertos USB	Al menos dos puertos USB 3.0

Nota: El PC y/o Ordenador deberá cumplir los requisitos de la norma IEC/EN 62368-1 o disponer de un certificado que lo acredite


Instalación del Software

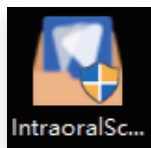

1 Haga doble clic en el paquete de instalación.



2 Seleccione la ruta de instalación, el idioma y acepte el acuerdo de usuario; después haga clic en "Instalar".

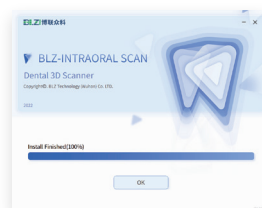


3 Espere a que finalice la instalación y pulse en "Aceptar".




4 Se creará un acceso directo del software de escaneo en el escritorio.


Calibración

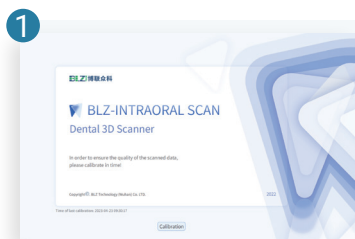

Abra el software.

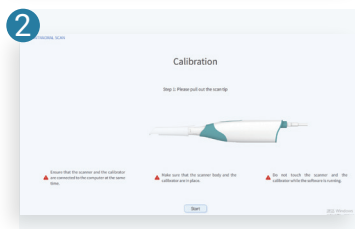


Conecte el dispositivo

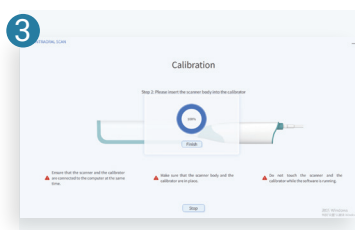

Haga clic en "Iniciar" y espere.

Haga clic en "Calibrar" y, a continuación, en "Iniciar"; espere a que la calibración finalice y cierre la ventana de calibración.


Ajustes

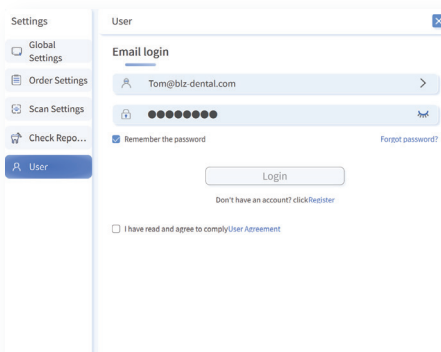

Inicio de sesión

En la página Usuario, haga clic en "Registrarse" para crear su cuenta y, a continuación, inicie sesión.

El equipo de My Lab Dental
Te creará la cuenta en el momento de la formación del uso del escáner.

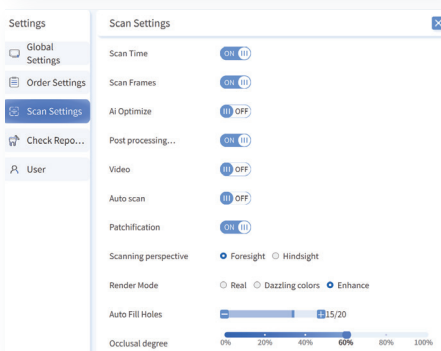

Ajustes de escaneo


Retraso de procesamiento: active esta opción para ejecutar todas las etapas de procesamiento al final del escaneo.

Escaneo automático: al activarlo, la luz de proyección se encenderá en cuanto se levante el mango.

Vídeo: si lo activa, el proceso de escaneo se grabará y se guardará en la carpeta del pedido.

Crear un nuevo pedido

- Abra el software de escaneo, cree un nuevo pedido, introduzca el nombre del paciente y seleccione las piezas dentales y el tipo de tratamiento.
- Guarde el pedido y haga clic en “**Escanear**” para iniciar el escaneo.

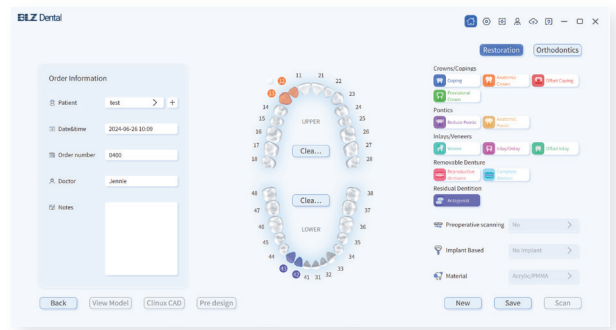


Escaneo

Escaneo de las arcadas superior e inferior



- SI, el Marco del indicador es de **color verde**: el escaneo se desarrolla con normalidad.
- SI, el Marco del indicador es de **color rojo**: la captura de datos es incorrecta. Mueva la punta del escáner a una zona que ya esté más completa y continúe el escaneo hasta que el marco vuelva a ponerse en verde.

Escaneo de oclusión: lados izquierdo, derecho y central

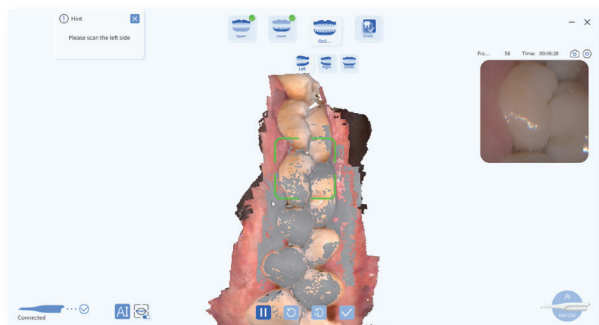

- Escanee primero un lado de la oclusión. Aparecerá un aviso cuando la alineación de ese lado se haya completado.

Revisión de pedidos

- Cargue el archivo en la plataforma en la nube.
- Compruebe la ubicación del archivo escaneado.
- Copie el pedido y el archivo escaneado.
- Elimine el pedido y el archivo escaneado.

